



موضع UriCap Female


يجب أن يبدأ موضع الجهاز من أعلى فتحة المهبل ويغطي المنطقة فوقها.

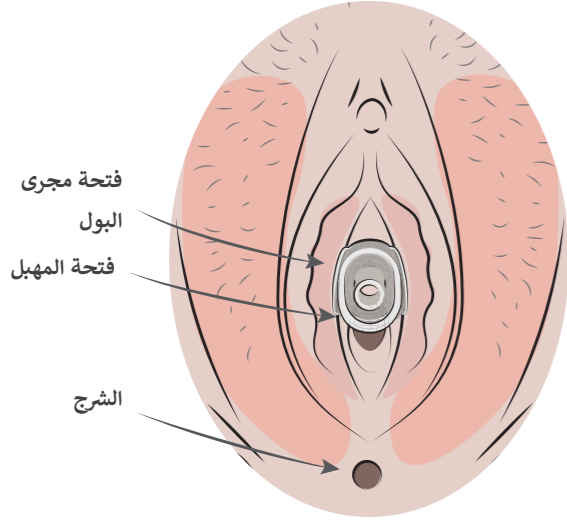


تأكد من عدم إغلاق فتحة المهبل أو إدخال الجهاز فيها، سيكون هذا الموضع منخفضاً جداً ويتوجب إعادة تثبيت الجهاز.

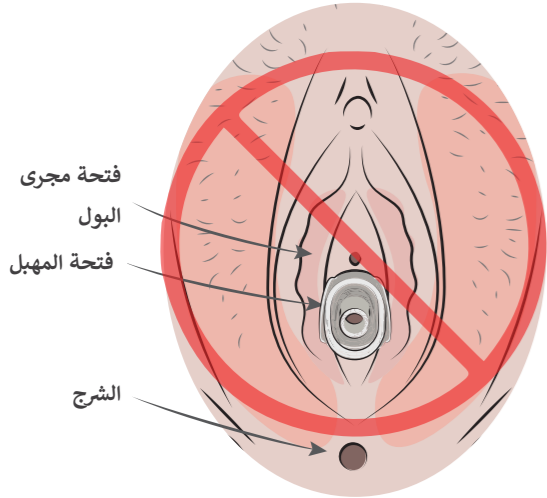


تركيب UriCap Female

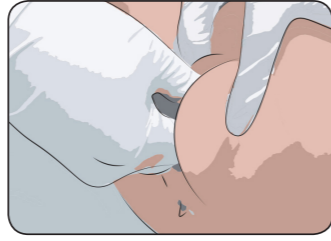

هـ. أغلق الشفرين الخارجيين حول UriCap، ثم اترك الجهاز من يدك.

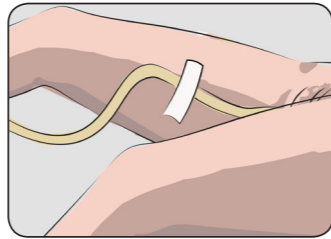


و. قم بتثبيت أنبوب التمديد على الفخذ الداخلي بشريط طبي، تأكد من ترك الأنبوب مرتخياً بشكل كافي، يجب أن يمر أنبوب كيس البول بين الساقين إلى تحت الركبة.

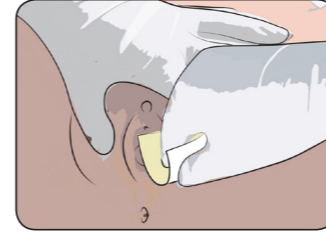


أ. قم بترطيب قطعة شاش صغيرة بمحلول ملحي فسيولوجي وتنظيف منطقة الفرج المهبلي من أعلى إلى أسفل.



ب. قم وبحذر بفتح الشفرين الخارجي والداخلي باليد غير المهيمنة.

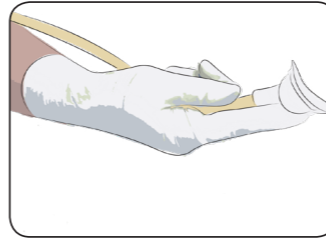

ج. امسك الجهاز باليد المهيمنة وفق وضعية الإصبع الموصى به.

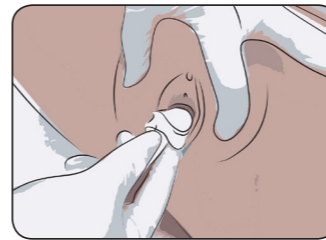

د. ضع الجزء السفلي من UriCap في الجزء العلوي من فتحة المهبل وثبته. ادفع Uri-Cap برفق للتأكد من التصاقه بشكل كامل بالجلد.




قبل التركيب

اغسل يديك بالماء والصابون وارتي قفازات نظيفة، قم بتحضير المعدات مسبقاً وفقاً للقائمة أدناه. تأكد من إبقاء المعدات في منطقة نظيفة.

- 1 جهاز UriCap Female
- 2 أنبوب تمديد
- 3 كيس البول
- 4 شاش ومحلول ملحي الفسيولوجي
- 5 مادة تزييت على أساس الماء
- 6 شريط لصق طبي

التركيب

1. قم بربط وصلة أنبوب التمديد بفوهة الجهاز.
2. قم بتوصيل كيس بول قياسي بأنبوب التمديد.

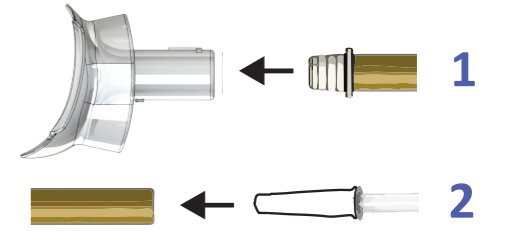

نصيحة

لتجنب الانزعاج أثناء تركيب الجهاز، يمكن وضع كمية صغيرة من مادة تزييت على أساس الماء على الطرف السفلي من الجهاز.



إزالة الجهاز

ز. قم بفتح الشفرين الخارجيين والداخليين، ثم انزع الجهاز برفق من الجهة العلوية من غطاء الجهاز إلى الأسفل ثم أخرجه. بهذه الطريقة يتم تحرير الالتصاق دون إزعاج **تحذير:** لا تسحب الجهاز مباشرة. قد يسبب ذلك عدم الراحة ويتسبب بأضرار للأنسجة.

