



UriCap Female התקן מיקום


מיקום ההתקן צריך להתחיל מפתח הנרתיק ולכסות את השטח שמעליו.

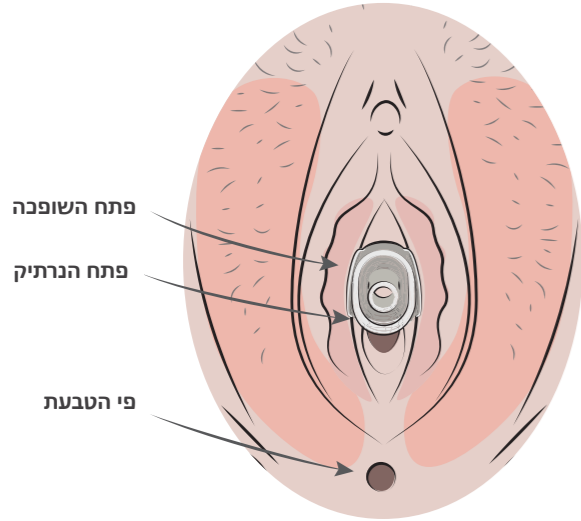


יש לשים לב שלא לכסות או להיכנס עם ההתקן לתוך הנרתיק, מיקום זה נמוך מדי ויהיה צורך להתקינו מחדש.

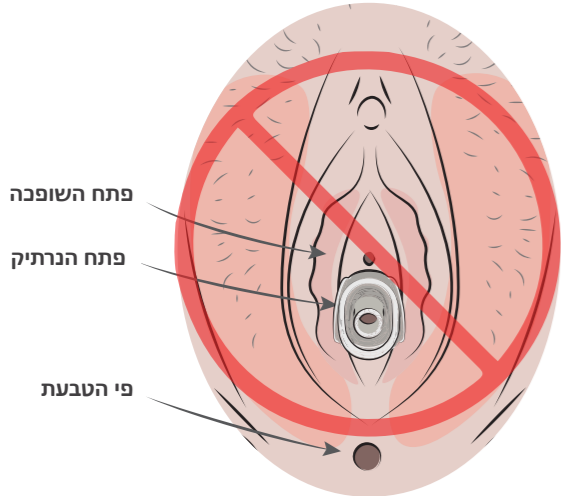


UriCap Female - התקנת ה

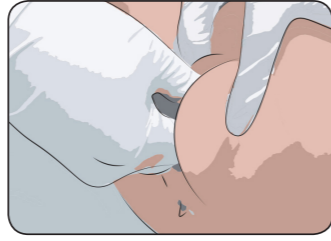

ה. יש לסגור את השפתיים החיצוניות סביב ה-UriCap, ורק לאחר מכן לשחרר את היד הדומיננטית

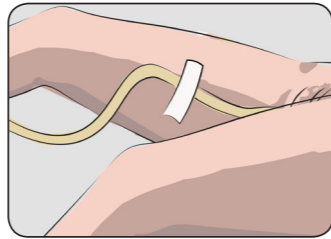


ו. יש להצמיד את צינורית ההארכה לירך הפנימית באמצעות סרט דביק רפואי, ולדאוג לכך שתישאר רפוייה מספיק. צינורית שקית השתן אמורה לעבור בין הרגליים מתחת לברך.

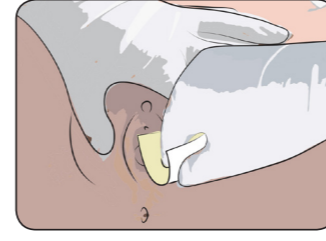


א. יש להרטיב גזה עם תמיסת מלח פיזיולוגית (סליין) ולנקות את אזור פתח הנרתיק מלמעלה למטה.




ב. יש לפסק בעדינות את השפתיים החיצוניות והפנימיות באמצעות היד שאינה דומיננטית.

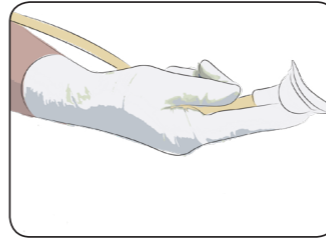

ג. יש לאחוז בהתקן באמצעות היד הדומיננטית בתנוחת אחיזה מומלצת.

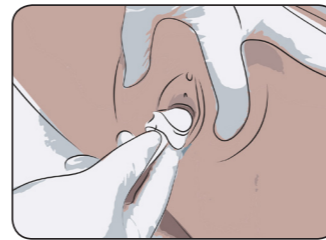



ד. יש להשעין את החלק התחתון של UriCap על פתח כניסת הנרתיק ולהדק כלפי מעלה. יש לדחוף קלות את התקן ה-UriCap בכדי להבטיח מגע מלא עם העור.

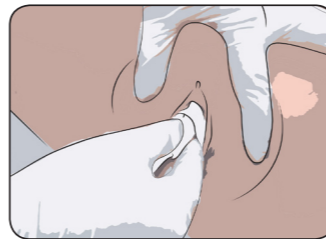

הסרה

ז. יש לפסק בעדינות את השפתיים החיצוניות והפנימיות. יש לקלף את ההתקן בעדינות מלמעלה למטה ולהסיר אותו. בדרך זו ההדבקה משתחררת ללא תחושת אי נוחות.

זהירות! אין למשוך את ההתקן ישירות החוצה. הדבר עלול לגרום לאי נוחות ונדק לרקמה.

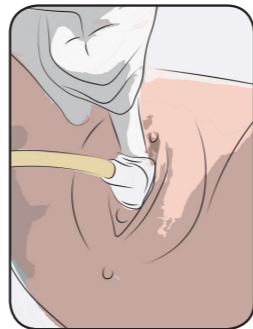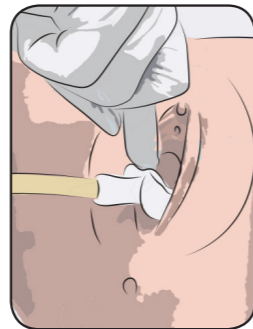


לפני ההתקנה

יש לשטוף את הידיים במים וסבון ולעטות כפפות. יש להכין את הציוד מראש בהתאם לרשימה שלהלן. יש להקפיד לשמור את הציוד באזור נקי.

- 1) התקן UriCap Female
- 2) צינורית הארכה
- 3) שקית שתן
- 4) תמיסת מלח פיזיולוגית וגזה
- 5) חומר סיכה על בסיס מים
- 6) סרט דביק רפואי

הרכבה

1. יש לחבר את מחבר צינורית ההארכה לצינורית ההתקן.
2. יש לחבר שקית שתן רגילה לצינורית ההארכה.

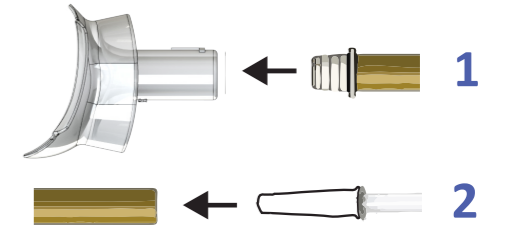

טיפ



בכדי למנוע אי נוחות במהלך התקנת ההתקן, ניתן למרוח כמות קטנה של חומר סיכה על בסיס מים על קצהו התחתון של המכשיר.