


הרכבה

החלפת שקית שתן

ניתן לפתוח את לשוניות האבטחה של ההתקן על מנת להחליף את שקית השתן (איור ז').

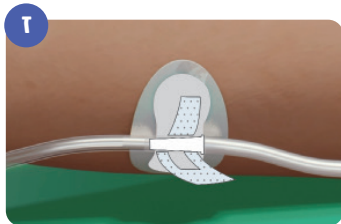

הסרה

יש למשוך את שתי הלשוניות ולהרחיק אותן מהסקוטש.

יש לקלף באטיות את ההתקן המייצב מהעור.

במידת הצורך ניתן להשתמש בפד ספוג באלכוהול כדי לעזור ולשחרר את הדבק.

טיפ

יש להחליף את התקן הקיבוע אחת ל-3 ימים. מומלץ להחליף רגל להדבקה בכל התקנה של ההתקן.




יש לעיין תמיד בהוראות השימוש כולל התוויות, התוויות הנגד, אזהרות, ונקיטת אמצעי זהירות. יש לפעול בהתאם למדיניות המקנים בעת השימוש במוצר.

TillaCare Ltd
ת.ד. 2093 קניון לב העיר, רחוב הרצל 39
טירת הכרמל 3912002, ישראל
כתובת לביקור: רחוב האתגר 2, בניין כרמל
טירת הכרמל 3903213, ישראל
כתובת דוא"ל sales@tillacare.com


זכויות יוצרים © TillaCare Ltd, 2021, כל הזכויות שמורות
DOC00031 REV.A HEB JAN 2022

א

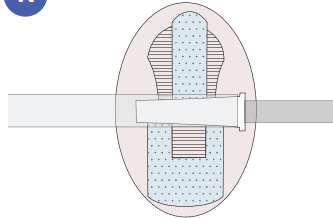


יש להניח את נקודת החיבור בין שקית השתן ומחבר הצינור באמצע הפס הלבן (איור א).

ב

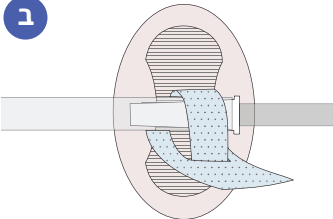

יש לאחוז את שתי הלשוניות ולהכניס את הלשונית היחידה אל הפתח הנמצא בלשונית הכפולה (איור ב').

ג

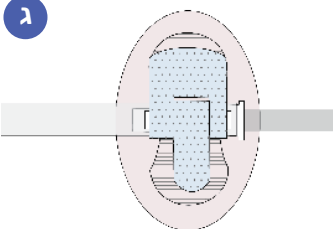


יש למשוך את שתי הלשוניות לכיוונים ההפוכים עד אשר הצנרת של ההתקן תפוסה בבטחה ולמשוך כל אחת מהן אל משטח הסקוטש המיועד לו (איור ג').

יישום

יש לחבר את התקן איסוף השתן.

ד

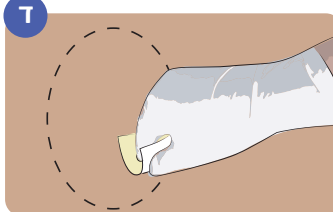


יש לנקות את אזור ההתקנה (איור ה') עם פד אלכוהול. יש להניח לאזור להתייבש לחלוטין.

ה



יש להותיר מספיק צינור רפוי כדי שלא למשוך את הצינור (איור ה').
יש לקלף צד אחד של גב הנייר המכסה ולהדביק על העור.

ו

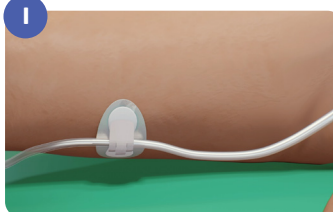

יש לחזור על הפעולה בצד השני (איור ה' + ו') יש לוודא כי כל הקצוות דבוקים היטב לעור.